


SCHRITT EINS | Android

Laden Sie die Hear Circle-App herunter

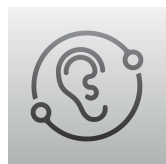

Hear Circle

Mit der Hear Circle-App können Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach über ein kompatibles Android-Mobilgerät steuern und auf hilfreiche Funktionen zugreifen.

Verwenden Sie die **Kamera** Ihres Geräts, um die App herunterzuladen:

- Scannen Sie den **QR-Code** unten und öffnen Sie die **URL**.



Eine Übersicht kompatibler Geräte finden Sie unter:
nuear.de

Lernen Sie mehr über die Hear Circle App

Besuchen Sie nuear.de für Gebrauchsanweisungen, Anleitungsvideos und weitere Informationen zu den Funktionen.



Informationen zu NE NXG AI, Hear Circle-App und iOS/Android-Kompatibilität finden Sie unter www.starkey.com/hearing-aids/apps. Die Verwendung des Made for Apple Abzeichens bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für den Anschluss an Apple-Produkte entwickelt und zertifiziert wurde und dass es die Apple Leistungsstandards erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischen Standards. Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

App Store ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC. Der Android-Roboter wurde in Abstimmung reproduziert oder modifiziert, von Google erstellt oder geteilt und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0 Lizenz für Namensnennung verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Starkey unter Lizenz verwendet.

Das Starkey-Logo, Edge Mode, Genesis, My Starkey und TeleHear sind Markenzeichen von Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten P00003749 09/23 BROCC2976-02-DE-NE Patent: www.starkey.com/patents

SCHRITT ZWEI | Android

Richten Sie die Hear Circle-App ein und koppeln Sie Ihre Hörsysteme.


1. Wählen Sie Einstellungen auf Ihrem Gerät.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Starten Sie Ihre Hörsysteme neu um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
4. Öffnen Sie die Hear Circle-App und Tippen Sie auf **LOS GEHT'S**.
5. Prüfen Sie die Nutzungsbedingungen: Dazu gehören der Endbenutzer-Lizenzvertrag und die Datenschutzrichtlinie. Tippen Sie auf **AKZEPTIEREN** um fortzufahren.
6. Koppeln und verbinden Sie Ihre Hörsysteme. Folgen Sie den Aufforderungen:
 - Die App bittet um die Erlaubnis, Ortungsdienste zu nutzen um Ihre Hörsysteme zu orten. Tippen Sie auf **ERLAUBEN**.
 - Wenn ein Paar Hörsysteme gefunden wurde, werden Sie aufgefordert zu bestätigen, dass es sich um Ihre Hörsysteme handelt. Tippen Sie auf **KOPPELN**.
 - Sie werden aufgefordert, die Hear Circle-App mit Ihren Hörsystemen zu verknüpfen. Tippen Sie auf **ERLAUBEN**.

SCHRITT DREI | Android

- Wenn mehr als ein Hörsystem gefunden wird, wird eine Liste angezeigt. (Wenn Sie 2 Hörsysteme tragen, werden ein linkes und ein rechtes angezeigt.) Wählen Sie das/die Kästchen neben Ihren Hörsystemen aus. Tippen Sie auf **VERBINDEN**.
 - Sobald Ihre Hörsysteme bestätigt sind, erscheint eine Glückwunschnachricht. Tippen Sie auf **WEITER**.
7. Melden Sie sich bei der App an. Erstellen Sie ein Konto:
 - Geben Sie eine aktive E-Mail Adresse an.
 - Erstellen Sie ein Passwort gemäß den Richtlinien und melden Sie sich an.
 8. Die App zeigt eine kurze Reihe von Genehmigungsbildschirmen an:
 - Lesen Sie die Beschreibungen.
 - Tippen Sie auf **ERLAUBEN** oder **WEITER**.
 - Sehen Sie sich die Startseite der App an und lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen.
 - Wählen Sie **VERSTANDEN**.

Jetzt können Sie Ihre App verwenden.
Siehe Rückseite für Anweisungen für Apple-Geräte.

Hear Circle-App Übersicht

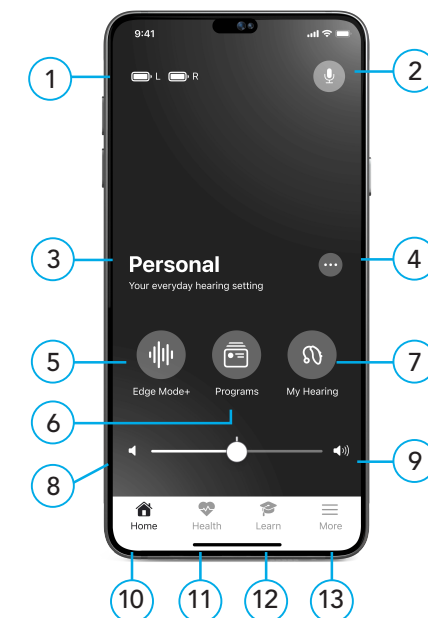

1. Linke und rechte Batterieanzeige
2. Smart Assistent
3. Verwendetes Programm
4. Programmoptionen
5. Edge Modus⁺: *sofortige Klanganpassung*
6. Programme
7. Mein Hörvermögen: *Selbsttest, Meine Hörsysteme finden, weitere Klangoptionen*
8. Stummschaltung
9. Lautstärkesteller
10. Startbildschirm
11. Gesundheit: *Messen Sie Ihre mentale und körperliche Fitness*
12. Lernen: *persönliche Tipps und Tricks*
13. Menü: *Konto, TeleHear, Erinnerungen, Übersetzungsfunktion*

*nur für bestimmte Technikstufen der Hörsysteme

NUEAR

Anleitung zum Einrichten der

Hear Circle App

Die Hear Circle-App bietet Ihnen die volle Kontrolle über Ihre NXG AI-Hörsysteme



Ihre NuEar NXG AI-Hörsysteme können sich per Bluetooth®-Technologie mit der kompatiblen Hear Circle-App verbinden. Diese App bietet folgende intelligente Funktionen, die Sie in Ihrem Alltag unterstützen:

- Nehmen Sie schnelle und sofortige Anpassungen vor, um überall besser zu hören.
- Lernen Sie mit personalisierten Inhalten Ihre neuen Hörsysteme kennen.
- Bleiben Sie gesund, indem Sie auf Ihr Gehör und Ihre körperliche Aktivität achten.
- Streamen Sie Telefongespräche, Musik, TV und andere Medien.
- Setzen Sie Erinnerungen, übersetzen und transkribieren Sie Sprache und vieles mehr.


Folgen Sie den Anweisungen in dieser Anleitung, um die Hear Circle-App zu verwenden.



NXG^{AI}

SCHRITT EINS | Apple

Laden Sie die Hear Circle-App herunter

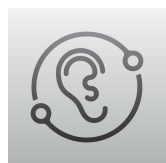

Hear Circle

Mit der Hear Circle-App können Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach über ein kompatibles Apple-Mobilgerät steuern und auf hilfreiche Funktionen zugreifen.

Verwenden Sie die Kamera Ihres Geräts, um die App herunterzuladen:

- Scannen Sie den QR-Code unten und öffnen Sie die URL.



Eine Übersicht kompatibler Geräte finden Sie unter:
nuear.de

SCHRITT ZWEI | Apple

Koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem Mobilgerät

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ihre Hörsysteme mit Ihrem mobilen Apple-Gerät zu verbinden. (Wenn Ihre Hörsysteme die Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät verlieren, versuchen Sie die Schritte erneut).

1. Tippen Sie auf das Symbol **EINSTELLUNGEN**. Wählen Sie **EINGABEHILFEN > HÖRGERÄTE**. (Wenn der Bluetooth-Kippschalter auf **AUS** steht, stellen Sie ihn auf **EIN**).
2. Starten Sie Ihre Hörsysteme neu um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3. Unter MFI-Hörgeräte sollten Sie Ihre Hörsysteme sehen (z. B. "Stefans Hörgeräte"). Tippen Sie auf die Hörsysteme.
4. Für jedes Hörsystem (**RECHTS** und **LINKS**) wird ein Dialogfeld eingeblendet. Tippen Sie in jedem Dialogfeld auf "**KOPPELN**".

Die Kopplung ist abgeschlossen.

ZUR ERINNERUNG: Es kann nur ein Paar Hörsysteme mit Ihrem Gerät verbunden werden.

HINWEIS ZUR AKTUALISIERUNG VON iOS: Wenn Sie die iOS-Version Ihres Geräts aktualisieren, kann es sein, dass Ihre Hörsysteme die Verbindung verlieren. In diesem Fall müssen Sie die Verbindung zwischen Ihren Hörsystemen und Ihrem Gerät trennen und erneut herstellen.

SCHRITT DREI | Apple

Richten Sie die Hear Circle-App ein

Öffnen Sie die Hear Circle-App und Tippen Sie auf **LOS GEHT'S** um zu beginnen.

1. Prüfen Sie die Nutzungsbedingungen: Dazu gehören der Endbenutzer-Lizenzvertrag und die Datenschutzrichtlinie. Tippen Sie auf **AKZEPTIEREN** um fortzufahren.
2. Verbinden Sie Ihre Hörsysteme. Folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten und Verbinden Ihrer Hörsysteme mit der App:
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörsysteme geladen und eingeschaltet sind.
 - Tippen Sie auf **WEITER**.
 - Sobald die App Ihre Hörsysteme gefunden hat, erscheint eine Glückwunschnachricht. Tippen Sie auf **WEITER**.

Wenn die App Ihre Hörsysteme nicht finden kann, stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und Ihre Hörsysteme mit Ihrem Gerät gekoppelt sind. Kehren Sie ansonsten zu **SCHRITT ZWEI** zurück: Koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit Ihrem Mobilgerät.

SCHRITT DREI | Apple


Melden Sie sich bei der App an. Erstellen Sie ein Konto:

- Geben Sie eine aktive E-Mail Adresse an.
 - Erstellen Sie ein Passwort gemäß den Richtlinien und melden Sie sich an.
4. Die App zeigt eine kurze Reihe von Genehmigungsbildschirmen an:
 - Lesen Sie die Beschreibungen.
 - Tippen Sie auf **ERLAUBEN** oder **WEITER**.
 - Sehen Sie sich die Startseite der App an und lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen.
 - Wählen Sie **VERSTANDEN**.

Jetzt können Sie Ihre App verwenden.

Siehe Rückseite für Anweisungen für Android-Geräte.

Hear Circle-App Übersicht

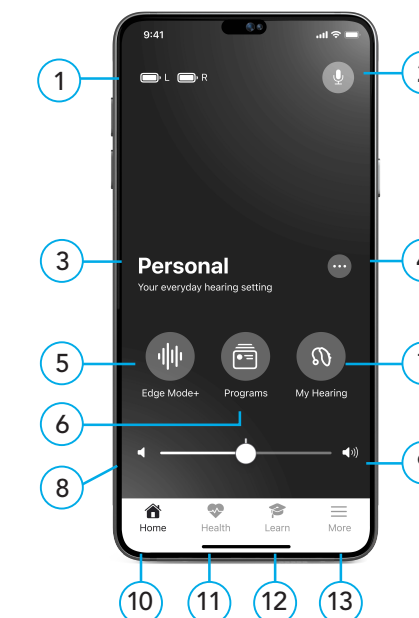

1. Linke und rechte Batterieanzeige
2. Smart Assistent
3. Verwendetes Programm
4. Programmoptionen
5. Edge Modus⁺: *sofortige Klanganpassung*
6. Programme
7. Mein Hörvermögen: *Selbsttest, Meine Hörsysteme finden, weitere Klangoptionen*
8. Stummschaltung
9. Lautstärkesteller
10. Startbildschirm
11. Gesundheit: *Messen Sie Ihre mentale und körperliche Fitness*
12. Lernen: *persönliche Tipps und Tricks*
13. Menü: *Konto, TeleHear, Erinnerungen, Übersetzungsfunktion*

*nur für bestimmte Technikstufen der Hörsysteme