

Herzlichen Glückwunsch!
In zwei einfachen Schritten
zur Thrive App: Ihrem
persönlichen HörAssistenten



Thrive App – für Apple



1. Schritt:

Laden Sie die Thrive App aus dem Apple Store herunter.
Suchen Sie hierzu nach der „Thrive App“.

Ausführliche **Bedienungsanleitung** und
Kompatibilitätscheck: QR-Code scannen



2. Schritt:

Koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit dem Smartphone.

Batteriefach der Hörsysteme auf und zu/von der
Ladestation entnehmen > neben Smartphone platzieren
> iPhone-Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörhilfen
> Ggf. Bluetooth einschalten > Tippen Sie auf den
Vornamen > Kopplungsanfrage bestätigen > Thrive App
öffnen

Die Kopplung muss nur einmalig durchgeführt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen
Hörsystemen und Ihrem persönlichen HörAssistenten.

Weitere Informationen:

<https://www.starkey.de/hoergeraete/apps>



Herzlichen Glückwunsch!
In zwei einfachen Schritten
zur Thrive App: Ihrem
persönlichen HörAssistenten



Thrive App – für Android



1. Schritt:

Laden Sie die Thrive App aus dem Google Play Store herunter. Suchen Sie hierzu nach der „Thrive App“.

Ausführliche **Bedienungsanleitung** und
Kompatibilitätscheck: QR-Code scannen



2. Schritt:

Kopeln Sie Ihre Hörsysteme mit dem Smartphone.

Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth einschalten >
Batteriefach der Hörsysteme auf und zu/von der Ladestation
entnehmen > neben Smartphone platzieren
Öffnen Sie die Thrive App > Kopplungsanfrage bestätigen

Die Kopplung muss nur einmalig durchgeführt werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Hörsystemen und
Ihrem persönlichen HörAssistenten.

Weitere Informationen:

<https://www.starkey.de/hoergeraete/apps>

